

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/kleszczyki-endodontyczne-sp-118-125-zmk-p-368.html>



Kleszczyki endodontyczne / SP-118-125-ZMK

Cena brutto	750,00 zł
Cena netto	694,44 zł
Numer katalogowy	SP-118-125-ZMK

Opis produktu

Długość całkowita: 125 mm

Długość dziobów: 20 mm

Długość ząbkowanej części pracującej: 5 mm

Średnica części pracującej przy zamkniętych dziobach: 0,8 mm

Siła nacisku: 150 - 200 G

Zastosowanie:

Do usuwania z kanałów korzeniowych fragmentów złamanych instrumentów endodontycznych po ich wcześniejszym odblokowaniu za pomocą systemów ultradźwiękowych oraz do usuwania ćwieków srebrnych. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej, niezwykle cienkiej i długiej ząbkowanej części pracującej narzędzie to umożliwia dotarcie do złamanych instrumentów endodontycznych na dużych głębokościach, pewne ich uchwycenie oraz usunięcie z kanału korzeniowego. Specjalny układ ząbków skierowanych do wewnątrz oraz większa grubość dziobów umożliwiają zastosowanie tego instrumentu do usuwania niezacementowanych ćwieków srebrnych bez użycia ultradźwięków. Ćwieki srebrne są stosunkowo miękkie co znacznie ogranicza zastosowanie ultradźwięków do ich usuwania (wysokie ryzyko oderwania fragmentu ćwieka w miejscu przyłożenia końcówki ultradźwiękowej).

Parametry użytkowe:

Cienkie i długie dzioby wygięte pod kątem 60° w stosunku do rękojeści umożliwiające wprowadzenie instrumentu głęboko do wnętrza kanału korzeniowego oraz swobodną pracę pod mikroskopem bez zasłaniania pola widzenia

Ostro zakończona oraz ząbkowana część pracująca ułatwiająca pewne uchwycenie złamanego instrumentu lub ćwieka srebrnego w kanale korzeniowym. Kleszczyki wyposażono w specjalny układ ząbków skierowanych pod ostrym kątem do wnętrza instrumentu, a nie prostopadle jak w klasycznym ząbkowaniu

Oś długa kleszczyków jest podwójnie wygięta na kształt litery S w celu łatwego ominięcia kącika ust i swobodnego manewrowania instrumentem pod mikroskopem bez zasłaniania pola widzenia

Sprężyna w rękojeści umożliwiająca automatyczne otwieranie kleszczyków przy zwolnieniu nacisku

Ergonomiczna i komfortowa rękojeść pokryta w pełni sterylizowalnym, antypoślizgowym oraz elastycznym w dotyku tworzywem.

Technika:

Zidentyfikowany fragment złamanego instrumentu endodontycznego należy w pierwszej kolejności odblokować za pomocą dowolnego systemu ultradźwiękowego dysponującego odpowiednimi końcówkami. Dotyczy to zarówno złamanych instrumentów endodontycznych zaklinowanych w pustych kanałach korzeniowych, jak i fragmentów narzędzi unieruchomionych przez stary materiał wypełniający kanał korzeniowy (np. cement lub Endomethason). Ze względu na większą siłę nacisku niż mikropęseta oraz specjalny układ ząbków, klinujących się w miękkim stopie srebra, narzędzie to jest szczególnie polecane do usuwania ćwieków srebrnych.