


Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/mikropeseta-endodontyczna-po-130-130-zmk-p-371.html>

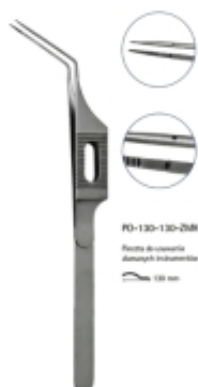

Mikropeseta endodontyczna / PO-130-130-ZMK

Cena brutto **520,00 zł**

Cena netto **481,48 zł**

Numer katalogowy **PO-130-130-ZMK**

Opis produktu

Długość całkowita: 130 mm

Długość dziobów: 25 mm

Długość ząbkowanej części pracującej: 5 mm

Średnica części pracującej przy zamkniętych dziobach: 0,6 + 0,8 mm

Siła nacisku: 100-150 G

Zastosowanie:

Do usuwania fragmentów złamanych instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych po ich wcześniejszym odblokowaniu za pomocą systemów ultradźwiękowych. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej, niezwykle cienkiej i długiej ząbkowanej części pracującej narzędzie to umożliwia dotarcie do złamanych instrumentów endodontycznych na dużych głębokościach, pewne ich uchwycenie oraz usunięcie z kanału korzeniowego.

Parametry użytkowe:

Cienkie i długie dzioby wygięte pod kątem 60° w stosunku do rękojeści umożliwiające wprowadzenie instrumentu głęboko do wnętrza kanału korzeniowego oraz swobodną pracę pod mikroskopem bez zasłaniania pola widzenia

Ostro zakończona oraz ząbkowana część pracująca ułatwiająca pewne uchwycenie złamanego instrumentu w kanale korzeniowym

Tuż za ząbkowaną częścią pracującą znajduje się mikrobolec stabilizujący położenie dziobów w pozycji zamkniętej. Uzyskano dzięki temu powtarzalność pozycji obu ząbkowanych części pracujących względem siebie oraz wyeliminowano częste zjawisko mijania się dziobów

Szeroka środkowa część rękojeści z antypoślizgowymi wyżłobieniami

Dwa bolce stabilizujące położenie rękojeści względem siebie oraz uniemożliwiające odkształcenie delikatnej ząbkowanej części pracującej przez zbyt silne zaciśnięcie instrumentu

Specjalnie zaprojektowane otwory w rękojeści ułatwiające stabilny uchwyt narzędzia

Technika:

Zidentyfikowany fragment złamanego instrumentu endodontycznego należy w pierwszej kolejności odblokować za pomocą dowolnego systemu ultradźwiękowego dysponującego odpowiednimi końcówkami. Dotyczy to zarówno złamanych instrumentów endodontycznych zaklinowanych w pustych kanałach korzeniowych, jak i fragmentów narzędzi unieruchomionych przez stary materiał wypełniający kanał korzeniowy (np. cement lub Endomethason). Mikropesetą można usuwać tylko luźne fragmenty złamanych instrumentów endodontycznych. Obruszanie zaklinowanego fragmentu złamanego instrumentu endodontycznego lub próba jego wyrwania na siłę ze starego materiału wypełniającego, bez zastosowania ultradźwięków, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mikropesety.